

# 床上伸縮スタンド (ASC-E) 注 意 事 項

## 【伸ばす場合】

①つまみ部分を両手で持って、上方向に持ち上げます。

②止めた位置で固定されます。

※つまみを持った手は、固定されるまで離さないでください。



## 【縮める場合】

①つまみ部分を両手で持ってください。

②つまみを引き上げながら、ペダルを踏んでください。

③ペダルを踏んだ状態で、下方向に縮めてください。

④止めた位置で固定されます。

※つまみを持った手は、固定されるまで離さないでください。



### ※縮める場合のご注意※

つまみを引き上げながらペダルを踏んでください。  
ペダルだけを踏もうとするとブレーキがかかります。  
それを無理に踏まないでください。  
配線が切断されて故障の原因になります。



※つまみを引き上げながらペダルを踏む※